

Гел
Тубичка от 30 г
С десет вагинални апликатора за еднократна употреба

с Hydeal-D® 0,2%
(хиалуронова киселина с удължено освобождаване)
Формула без парабени

Информация за продукта

Вагиналният епител е мек и еластичен благодарение на деликатно балансиран механизъм, който поддържа правилната степен на хидратация и смазване.

В определени периоди от живота на жената (напр. след раждане, по време на кърмене или в менопауза), след определени фармакологични лечения или заболявания или по време на повишен стрес, този деликатен баланс може да бъде нарушен, причинявайки значителен дискомфорт, характеризиращ се с вагинална сухота и парене или усещане за сърбеж.

Паренето и дразненето често са свързани с малки лезии на епитела, причинени от липса на смазване.

В такива случаи е препоръчително да използвате локален продукт, който благоприятства хидратацията на лигавицата и спомага за възстановяване на естествената еластичност, и мекота. HYALO GYN е безцветен гел със силни хидратиращи свойства, който съдържа Hydeal-D, производно на хиалуроновата киселина, което позволява удължено освобождаване на мястото на приложение.

Хиалуроновата киселина е естествена молекула, отговорна за поддържането на правилното ниво на хидратация в тъканите, освен че играе основна роля в процесите на възстановяване на тъканите.

Формулата на базата на Hydeal-D предлага оптимална адхезия към вагиналната лигавица, има удължено хидратиращо действие и благоприятства естественото заздравяване на микролезиите.

Състав

Основен компонент: Hydeal-D 0,2% (производно на хиалуронова киселина с удължено освобождаване)

Други компоненти: Пропилен гликол, Метилпропандиол, Карбомер, 1,2-Хександиол, Каприлил гликол, Натриев хидроксид, Пречистена вода.


Формулата не съдържа нито парабени, нито други консерванти.

Показания

Гел, допълващ лечението на вагинална сухота от различен произход; подпомагане на естествения процес на зарастване на предизвикани от триене микролезии във вагиналната лигавица.

Как да използвам

1. Завийте здраво апликатора върху накрайника на тубата;
2. Стиснете тубата, за да напълните апликатора, докато буталото спре;
3. Развийте апликатора от тубата. Препоръчително е да извадите малко количество гел от апликатора преди употреба, така че върхът да се смаже преди да бъде въведен във влагалището;
4. След като измиете старателно ръцете си и областта около вагината, поставете апликатора във влагалището, като заемете клекнало или легнало положение и натиснете буталото, докато целият гел бъде поставен;
5. Извадете апликатора. Апликаторите са само за еднократна употреба и трябва да се изхвърлят след употреба.

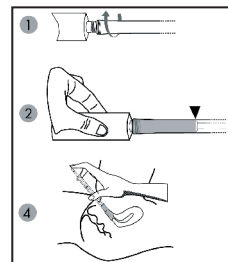

Честота на употреба

Честотата, с която трябва да се използва продуктът, зависи от това колко суха е вагиналната лигавица. Препоръчва се едно приложение на всеки три дни за период от тридесет дни, освен ако не е предписано друго. Лечението не изисква прекъсване по време на менструация.

Противопоказания

Доказана индивидуална свръхчувствителност към продукта.

Предупреждения и предпазни мерки

В случай на вагинална инфекция, консултирайте се с Вашия лекар преди употреба на продукта. При пациенти с особена индивидуална чувствителност към който и да е компонент на лекарствената форма и/или в началото на лечението може да се появи преходно вагинално парене или усещане за топлина. В случай на продължително парене е препоръчително да спрете лечението и да се консултирате с Вашия лекар.

Продуктът не повлиява резултатите от гинекологичните изследвания.

Този продукт е съвместим с латексови и полиизопренови презервативи със смазка/без смазка.

Този продукт не е съвместим с полиуретанови презервативи.

Да не се използва едновременно с продукти, съдържащи кватернерни амониеви соли, като бензалкониев хлорид, тъй като хиалуроновата киселина може да се утаи в тяхно присъствие.

Всеки апликатор е само за еднократна употреба и трябва да се изхвърли след употреба. Ако се използва повторно, Fidia Farmaceutici не може да гарантира за ефективността, функционалността или чистотата на апликатора.

Не използвайте продукта, ако опаковката има повреди, които нарушават целостта на тубата.

Не изхвърляйте празната опаковка в околната среда.

Не използвайте продукта след срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Съхранявайте на недостъпно за деца място.

Нежелани лекарствени реакции

Както при други продукти, използвани за лечение на вагинална сухота, може да се появи малък белезникав секрет без мирис.

Съхранение

Да се съхранява при температура не по-висока от +30°C.

Да не се замразява.

Опаковка

Кутия, съдържаща една тубичка от 30 г и десет вагинални апликатора за еднократна употреба, запечатани в прозрачен плик.

Производител

FIDIA Farmaceutici S.p.A.
Via Ponte della Fabbrica 3/A
35031 Абано Терме (PD)
ИТАЛИЯ

Вносител и дистрибутор за България

НОВУС ЕООД
Пощенска кутия 147; София 1463
+35928586039; +359877192700
office@novus.bg
www.novus.bg

Онлайн дрогерия:

novushealth.bg



0459



Вижте инструкциите за употреба



Използвайте до



Партиден номер



Температурен диапазон



Не използвайте ако опаковката е увредена



Не използвайте повторно



Производител

Дата на последната редакция на инструкциите за употреба: септември 2017